

Garantie/service à la clientèle

Les pièces de Dr. Frank's déclarées défectueuses dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, en raison de matériaux ou de la fabrication, seront réparées ou remplacées sans frais, à la discrétion d'Ideal. Des conditions s'appliquent. Pour le service technique et des informations complètes sur la garantie, contactez le service à la clientèle de Neogen au 800/525-2022 ou au 859-254-1221.

La gamme d'équipement obstétrique de qualité d'Ideal disponible par l'entremise de votre distributeur local Ideal comprend également :

- Extracteur foetal à double traction Calf Eze™.
- Chaînes et poignées d'obstétrique.
- Collet Save-A-Calf.
- Scie et poignées d'obstétrique.
- Thermomètres vétérinaires.
- Gants d'obstétrique longueur épaule.
- Tétines clipsables de qualité supérieure.
- Biberons pour veau et agneau.
- Tétines pour agneau à débit contrôlé.
- Tétines pour veau/agneau rouges à visser.




Product #3003

Dr. Franks®

Extracteur foetal

Manuel d'instructions

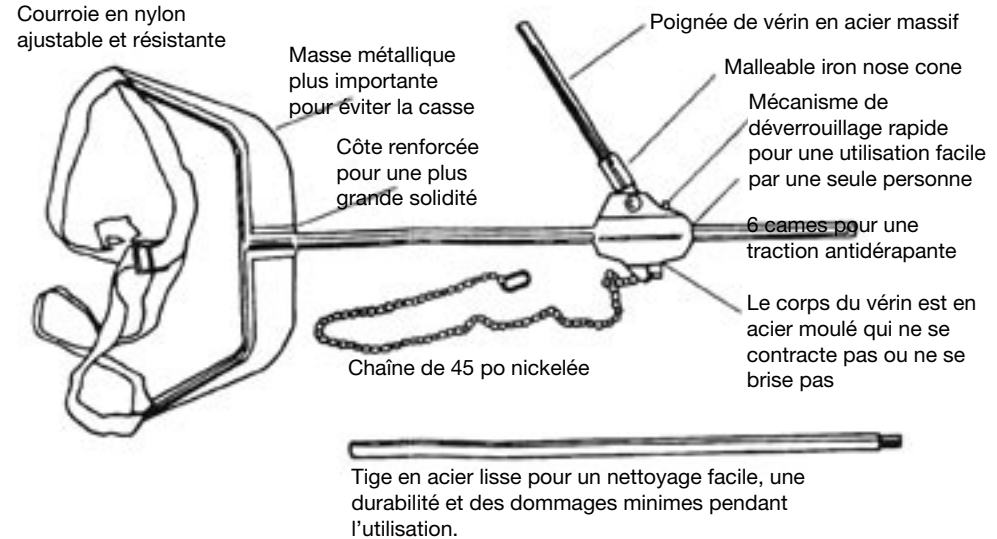

Description de l'appareil

L'extracteur foetal de Dr. Frank's est un instrument vétérinaire de précision conçu pour accoucher les veaux rapidement et en toute sécurité, avec peu d'efforts. Développé par B. N. Frank, spécialiste en obstétrique, l'extracteur foetal est devenu l'outil standard dans l'industrie de la vache/du veau.

L'extracteur foetal de Dr. Frank's permet aux éleveurs de bétail de fournir une tension uniforme et constante. Par conséquent, il n'y a pas de dérapage ni de recul. La traction exercée sur le veau et la contre-poussée exercée contre la vache induisent l'écartement des os pelviens, l'élévation de l'abdomen et la cambrure du dos de la vache.

Fonctionnant avec un mouvement de rotation, l'extracteur foetal de Dr Frank's travaille avec le processus naturel de la naissance, à une vitesse qui correspond à la dilatation du canal génital et des muscles pelviens de la vache au fur et à mesure que le foetus les traverse. C'est pour cette raison que les accouchements « avec hanche bloquée » sont relativement faciles.



800-525-2022 or 859-1254-1221
944 Nandino Blvd., Lexington, KY 40511
animalsafety.neogen.com • e-mail: inform@neogen.com

Stockage


Chaque partie de l'extracteur fœtal de Dr. Frank's peut être rangée dans son propre compartiment dans la valise de transport en vinyle renforcé et imperméable en option. Les pièces doivent toujours être nettoyées, désinfectées et séchées après utilisation avant de les remettre dans leur lieu de stockage.

Visser les tiges ensemble en toute sécurité


L'extracteur complet peut être assemblé en une minute, mais prenez soin de noter ce qui suit :

Placez la plus longue tige dans la culasse. Assurez-vous de bien visser les tiges mâle et femelle ensemble. Ces extrémités de tige doivent être serrées l'une contre l'autre pour assurer un bon ajustement. Si elles ne sont pas complètement vissées ensemble, elles peuvent se plier au point A tel qu'indiqué sur le schéma.


L'utilisation du vérin au-delà du point 3/4 de l'arbre arrière peut provoquer une flexion, comme au point B.

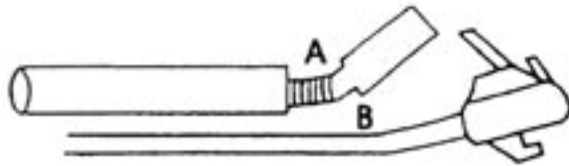


Mode d'emploi

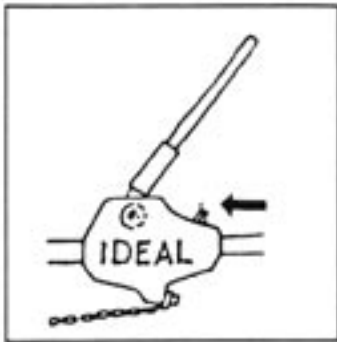


Before using the Dr. Frank's Fetal Extractor, pull the cams toward the jack so that the jack will slide easily onto the rods.

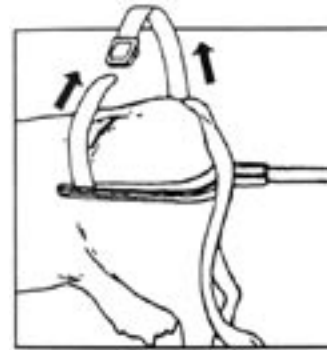


Placez la culasse (clé de culasse) contre la croupe de la vache, et placez la courroie ajustable devant les arêtes intramusculaires pour maintenir la culasse en place.

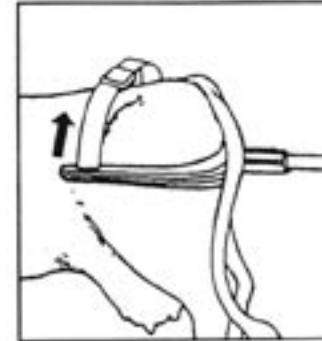

Les oreilles de la culasse doivent être tournées vers le haut (vers l'arrière) pour éviter qu'elles ne se cassent.

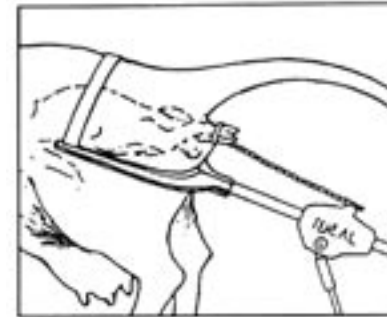

Attachez maintenant le pied et la chaîne de traction aux pattes du veau et au corps du vérin.

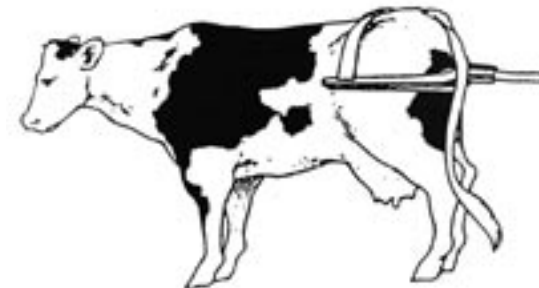

Attention : Lorsque vous utilisez le vérin, assurez-vous de ne pas le prolonger au-delà des trois quarts de la longueur de l'arbre, car la tension du vérin sur l'arbre peut le faire se courber (voir point B).