

REVEAL® Q+ PARA FUMONISINA

BAIXE E LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DO KIT ANTES DE REALIZAR O TESTE.



Materiais fornecidos:

25 tiras de teste Reveal® Q+ para fumonisina
25 recipientes vermelhos de diluição de amostra
25 recipientes transparentes de amostra
01 frasco de diluente de amostra

Número do produto: 8885

Faixa: 0,3–6 ppm


Tempo de teste: 6 minutos

Para comprar, ligue para +1 (800) 234.5333 ou acesse NEOGEN.com

Procedimento



1 Primeiramente, insira o código QR no leitor Raptor® Solo.

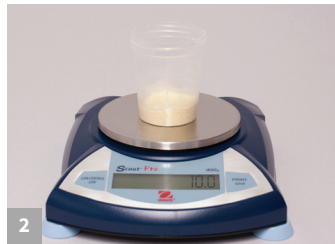

2 Obtenha uma amostra representativa. Triture e pese uma amostra de 10 g.




3 Acrescente à amostra 50 mL de etanol a 65%.




4 Agite vigorosamente durante 3 minutos ou misture durante 1 minuto.



5 Aguarde precipitar e depois filtre ou centrifugue a amostra.

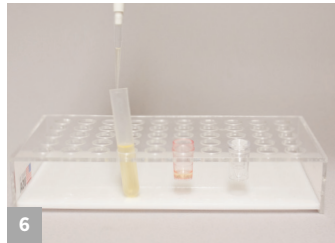

6 Acrescente 200 µL de extrato de amostra ao recipiente vermelho de diluição.

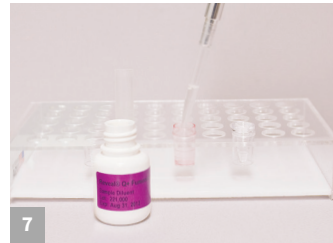

7 Acrescente 400 µL do diluente de amostra ao frasco vermelho de diluição e misture 5 vezes.




8 Coloque a tira no cartucho Raptor.



9 Coloque o cartucho no leitor Raptor Solo.



10 Acrescente 400 µL da amostra do frasco vermelho de diluição na parte de trás do cartucho Raptor. A leitura começará automaticamente.

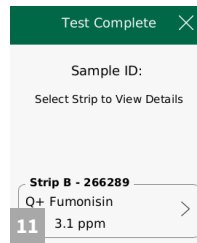

11 Os resultados são mostrados no leitor Raptor Solo Observação: amostras acima de 6 ppm precisam ser diluídas e testadas novamente.



Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333 ou acesse NEOGEN.com

Reveal® Q+

para Fumonisina

Número do produto: 8885

Informações para pedidos

8885 Reveal Q+
para Fumonisina
9696 Plataforma Raptor Solo
9681 Cartuchos Raptor



Materiais recomendados, não fornecidos

NEOGEN #	Descrição do item
9428, 9428B	Recipientes para coleta de amostra com tampa, 125 mL
9330	Minicentrífuga
9172	Tubos para microcentrífuga
9448, 9447	Bomba dispensadora ou proveta
9401, 9453	Triturador agri-grind ou equivalente
9427	Balança capaz de pesar de 5 a 50 g ± 0,1 g
9426, 9452	Cronômetro
8073, 8074	Solução de etanol 65%
9421, 9421B	Tubos de coleta para amostra com tampa
9420, 9429, 9519	Seringas com filtro, filtro de papel Whatman #4 ou equivalente
9475	Suporte para recipientes de amostra Reveal
9463	Pipetador, 100–1000 µL
9693	Pipetador, 400 µL
9464, 9487	Ponteiras de pipeta, 100–1000 µL
—	Água destilada ou deionizada

Teste com confiança

Reveal® Q+ para fumonisina da NEOGEN®, um teste quantitativo de fluxo lateral e fácil de usar que oferece precisão inigualável em apenas 6 minutos.

O leitor Raptor® permite que o usuário simplesmente adicione a amostra e deixe que o aparelho faça o restante! O aparelho controla o volume, a temperatura e o tempo do seu ensaio. O sistema permite que você teste três amostras ao mesmo tempo.

- Procedimento **simples** — é só colocar a amostra
- Resultado **rápido**
- **Elimina** erros operacionais

